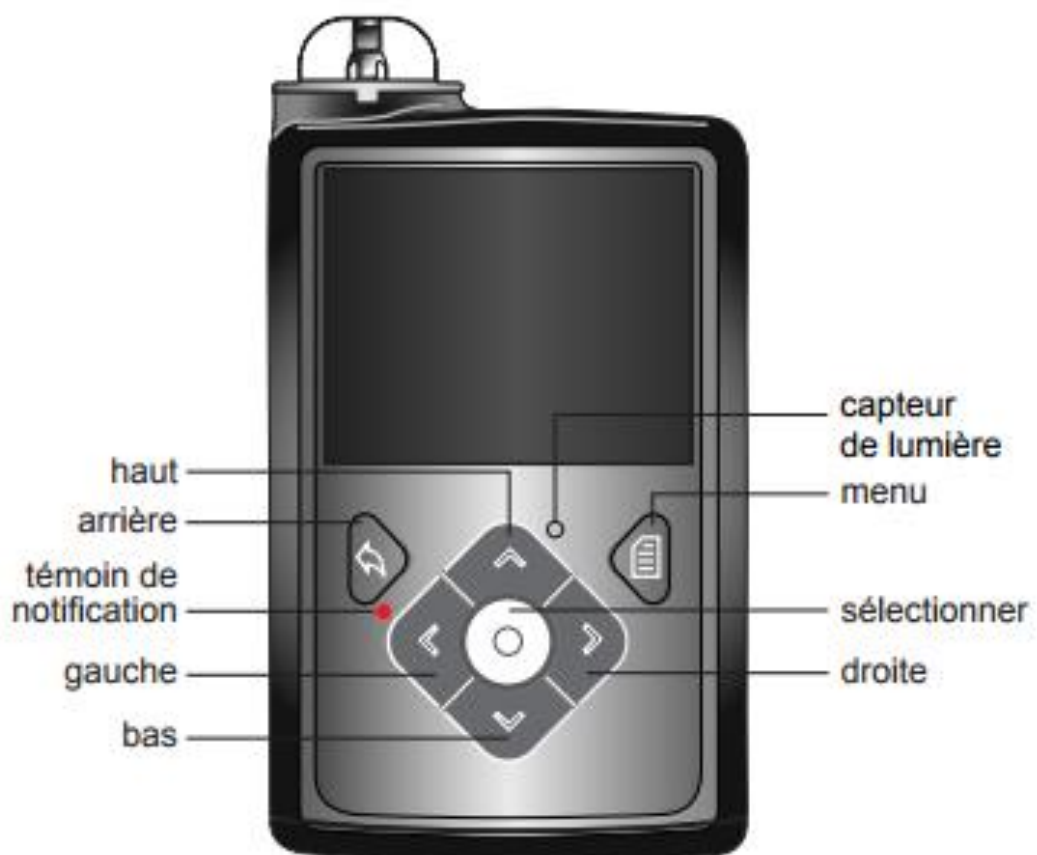

Pompe 640 : Mode d'emploi










Le tableau suivant décrit l'utilisation des touches.

| Pour : | Procédez comme suit : |
|--|--|
| Faire défiler un menu ou une liste vers le haut ou vers le bas, ou augmenter ou diminuer la valeur d'un réglage. | Appuyez sur les touches \wedge ou \vee . |
| Sélectionner un élément sur un écran ou un menu. | Appuyez sur les touches \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner l'élément souhaité puis appuyez sur la touche \circ . |
| Saisir une valeur dans un champ. | Appuyez sur les touches \wedge , \vee , \langle ou \rangle pour sélectionner le champ souhaité puis appuyez sur la touche \circ . Le champ sélectionné clignote. Appuyez sur les touches \wedge ou \vee pour entrer la valeur souhaitée puis appuyez sur la touche \circ . |
| Revenir à l'écran précédent. | Appuyez sur la touche \leftarrow . |
| Afficher l'écran Menu. | Appuyez sur la touche \equiv . |
| Afficher l'écran d'accueil. | Quel que soit l'écran où vous vous trouvez, autre que l'écran d'accueil, appuyez sur la touche \leftarrow et maintenez-la enfoncée pendant une seconde. |
| Mettre la pompe en mode veille. | Maintenez la touche \equiv enfoncée pendant environ deux secondes. |
| Faire passer la pompe en mode actif. | Appuyez sur n'importe quelle touche. |

Faire un bolus



- Sélectionner « Bolus » avec la flèche gauche
- Valider avec la touche 
- Déterminer le nombre d'unités avec les flèches haut et bas
- Valider avec 
- Confirmer l'administration à nouveau avec 

Voir l'historique des bolus

- Appuyer sur la touche « Menu »
- Descendre sur « Historique » avec la flèche du bas
- Sélectionner avec 
- Descendre sur « Résumé » avec la flèche du bas et valider avec 

Vous pouvez désormais voir tout l'historique des bolus que vous avez envoyé.







Changer le réservoir (cartouche)

- Appuyer sur « menu »
- Descendre avec la flèche du bas sur « Réservoir + tubulure »
- Valider avec 
- Descendre sur « Nouveau réservoir »
- Valider avec 
- Valider « Retour piston »
- Lire et suivre les instructions de l'écran.

La purge du cathéter se fait avec environ 15 UI de bolus. Il est purgé lorsque des gouttes perlent au bout de l'aiguille.

Faire un débit de base temporaire






>> Il permet de palier un effort en limitant le risque d'hypoglycémie (base temp. Inf. à 100%)
OU palier des hyperglycémies répétées pour cause de maladie ou journée « canapé » (base temp. Sup. à 100%)

- Sélectionner « Basal » sur l'écran d'accueil
- Sélectionner « Basal temp. » avec la flèche du bas et valider avec 
- Appuyer à nouveau sur  : la durée clignote
- Régler la durée (temps estimé de l'activité) avec les flèches haut et bas
- Descendre sur « suivant » avec la flèche du bas puis 
- Valider à nouveau avec  pour que le pourcentage clignote
- Régler avec les flèches haut et bas la valeur souhaitée
- Valider avec 
- Aller sur démarrer avec les flèches et valider avec 



Pour annuler le basal temporaire avant la fin du temps programmé, sélectionner « Basal temp. » sur l'écran d'accueil, puis sélectionner « Annuler Basal temps. ».

Faire un bolus carré

>> Il permet d'éviter le phénomène hypo/hyper souvent rencontré en cas de repas prolongé en divisant en 4 le bolus sur un temps déterminé (même dose que d'habitude mais sur un temps plus long)

- Sélectionner « Bolus » sur l'écran d'accueil
- Choisir bolus manuel et valider avec 
- Régler les unités de bolus souhaitées puis valider sur « suivant »
- Sélectionner « CARRÉ » puis valider avec 
- Valider à nouveau avec  pour que la durée clignote
- Régler le temps ESTIMÉ du repas et valider avec 
- Sélectionner « Administration du bolus » et valider avec 

Modifier le débit basal

- Aller dans « menu »
- Descendre avec les flèches sur « Réglages insuline » et valider avec 
- Descendre sur « Régl. Schémas basaux » avec les flèches et valider avec 
- Sélectionner et valider « Schéma 1 »
- Aller sur « Options »