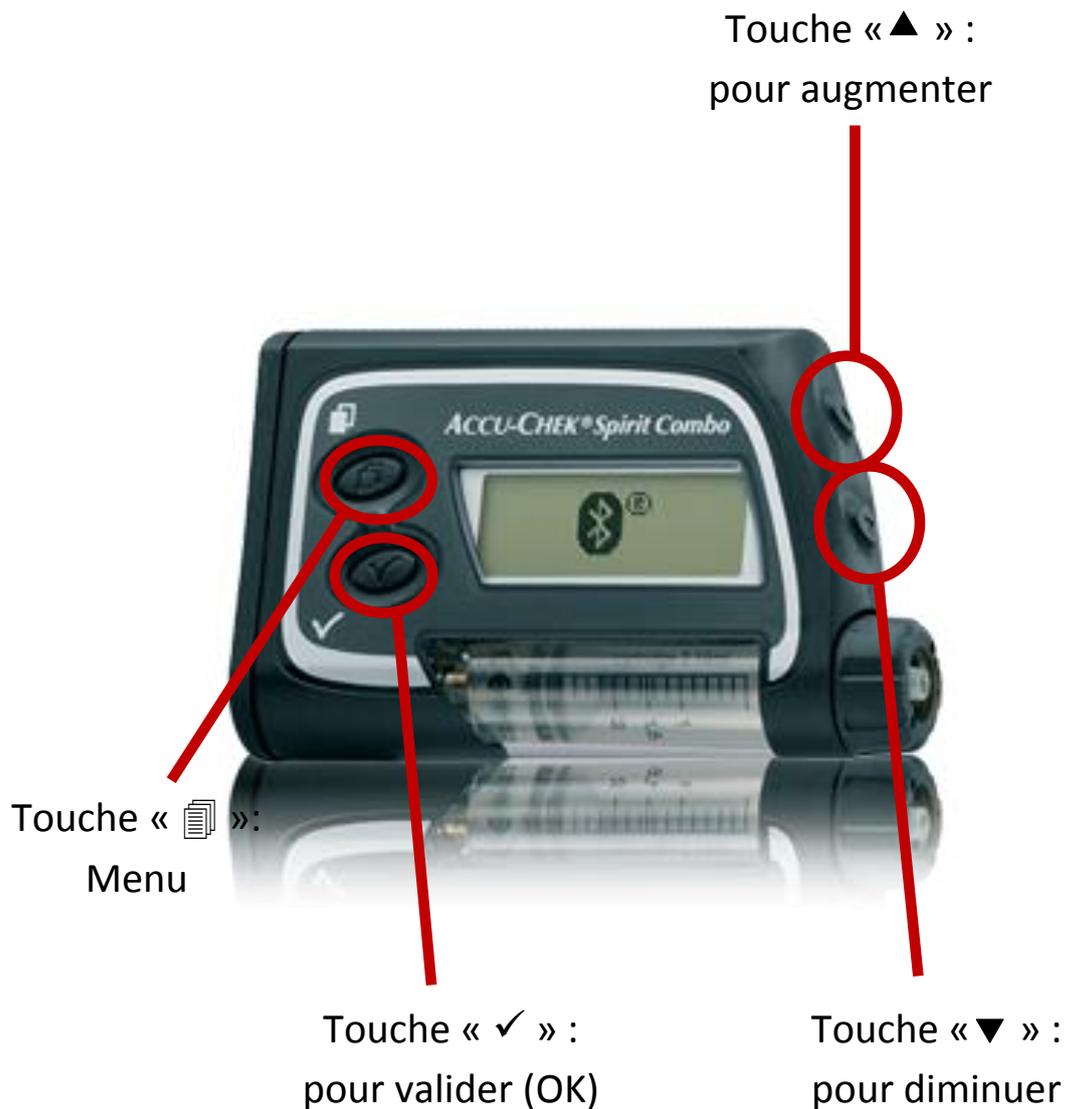

Pompe Spirit Combo : Mode d'emploi



58 avenue du Général de Gaulle
Résidence Mermoz – 3^e étage
Tél : 02.43.28.77.88
Mail : contact@satimsante.fr

Présentation de la pompe :



Les touches :

- Touche « ☰ » : pour entrer dans le menu et y naviguer.
 - Touche « ✓ » : valider une information.
 - Flèche sur le côté vers le bas : choisir une option, diminuer.
 - Flèche sur le côté vers le haut : défiler en haut en bas, augmenter.
- J'appuie une fois dessus et j'obtiens l'éclairage.

Mode MARCHÉ :

- J'appuie une fois sur la touche Menu «  »
- J'appuie sur « ✓ ». pour valider

Mode STOP :

- Je reste appuyer sur la touche Menu «  » jusqu'à ce que le mot « STOP » apparaisse à l'écran.
- Une fois le mot apparu à l'écran, j'appuie sur « ✓ ». pour valider

Bolus :

La pompe doit être en mode MARCHÉ.

- J'appuie deux fois sur la touche «  » (Menu)
- L'écran affiche « BOLUS STANDARD »
- Je valide en appuyant sur « ✓ »
- Je règle le bolus avec les flèches de droite
- J'appuie deux fois sur « ✓ » pour valider. Les unités du bolus d'insuline passent.

Historique des bolus :

La pompe est en mode MARCHÉ.

- J'appuie une fois sur la touche Menu «  »
- Je recherche la fonction « Mes données » en appuyant sur la touche « Menu »
- Je valide avec « ✓ ».
- L'écran affiche « Mémoires bolus »

Maintenant je peux lire mes différents Bolus envoyés, à l'aide des flèches sur le côté.

Changement de la cartouche et du réservoir :

La pompe est en mode STOP

- J'appuie deux fois sur la touche Menu «  », l'écran affiche « CHANGEMENT DE CARTOUCHE »
- Je valide avec « ✓ ».
- Je retire la cartouche vide
- J'appuie trois secondes sur « ✓ ». (touche valider) pour faire reculer la tige filetée.
- A l'écran apparait le volume de la cartouche (315U)
- J'insère mon réservoir dans la pompe en vissant l'adaptateur.
- J'appuie sur « ✓ ». pour valider et déclencher l'autotest.
- L'écran : « PURGEDU DISPO. DE PERFUSION », restez trois secondes appuyer sur la touche « ✓ » pour valider
- Lorsque l'insuline perle au bout du cathéter, appuyer sur la touche valider « ✓ »
- Maintenant, remettre la pompe en marche.

Si j'installe un cathéter (téflon) alors je pose mon point d'injection, je connecte avec le cathéter qui sera purgé. Et maintenant je purge la canule.

La purge du cathéter :

La pompe est en mode STOP

- J'appuie une fois sur la touche Menu «  »
- Je recherche la fonction « PURGEDU DISPO. DE PERFUSION » en appuyant à plusieurs reprises sur la touche Menu «  »
- Je valide avec « ✓ ».
- J'appuie de nouveau sur la touche Valider « ✓ ». pendant 3 secondes pour lancer la purge.
- Lorsque l'insuline perle le bout du cathéter, appuyer sur la touche valider « ✓ ».
- Maintenant, remettre la pompe en marche.

Changement du débit de base :

La pompe est en mode MARCHE.

- J'appuie une fois sur la touche Menu «  »
- Je recherche la fonction « PORGRAMMER LE PROFIL DE DB »
- Je valide avec « ✓ ».
- L'écran : « quantité totale ex : 7U »
- J'appuie une fois sur la touche Menu «  »
- Je suis maintenant dans le programme
- Je fais défiler les heures avec la touche Menu «  »
- J'augmente mon débit aux heures correspondantes avec la flèche du haut
- Je diminue mon débit aux heures correspondantes avec la flèche du bas.*
- Je valide en appuyant deux fois sur la touche « ✓ » pour que le programme soit actif.

Organisation d'un système d'astreinte téléphonique 24h/24 et 7jrs/7

La conseillère technique, Mme HERRAULT Françoise

 02.43.28.77.88 OU 06.80.70.94.61

Notes : _____

