

5- Faire un Bolus de correction

Administrer un bolus



Automatisé



Manuel

Remarque : Le bouton UTILISER LE CAPTEUR n'est actif que lorsque l'Omnipod 5 reçoit les valeurs du capteur de glucose.


Remarque : Le bolus prolongé est disponible en Mode Manuel uniquement.

1




- Appuyez sur le bouton Bolus sur l'écran d'accueil.

2

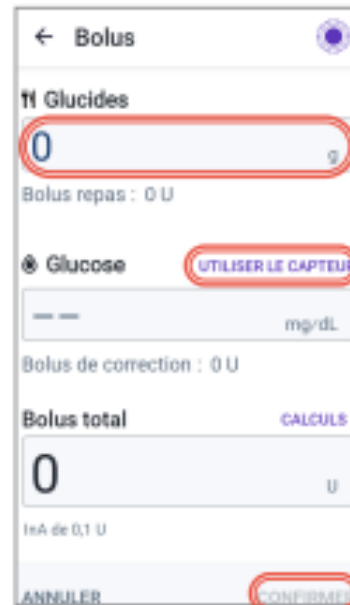


- Appuyez sur le champ Glucides pour entrer la valeur des glucides.
- Appuyez sur **UTILISER LE CAPTEUR** pour utiliser la valeur et la tendance du capteur de glucose ou ajoutez une valeur de glycémie en appuyant sur le champ Glucose.
- Appuyez sur **CONFIRMER**.

3

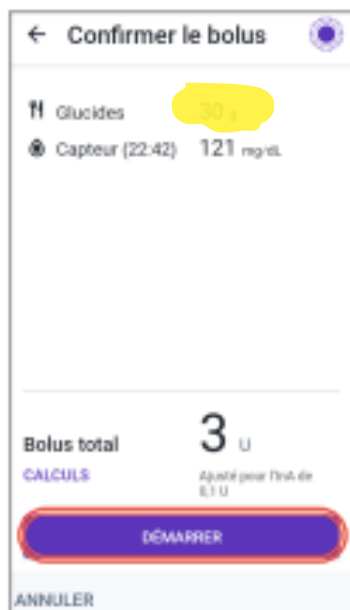

- Les entrées vérifiées sont correctes.
- Appuyez sur **DÉMARRER** pour lancer l'administration du bolus.

4

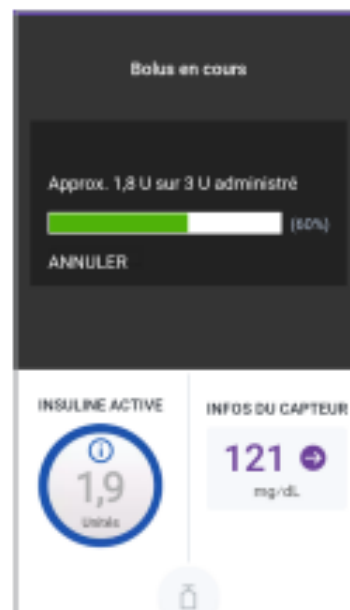

- L'écran d'accueil affiche la progression de l'administration du bolus.