

6- Le mode ACTIVITÉ

Utiliser ce mode avant une activité quelle soit physique ou non, cela dépend du métabolisme de chacun, démarrer le mode jusqu'à 1 ou 2h avant.

Démarrer la fonction Activité



Automatisé

Remarque : La fonction Activité n'est disponible qu'en Mode Automatisé.


La fonction Activité du système Omnipod 5 peut être activée pour les moments où il peut y avoir une diminution des besoins en insuline, comme lors de l'exercice. Cela réglera le glucose cible du Mode Automatisé sur 150 mg/dl (8,3 mmol/l) et réduira l'administration d'insuline. Remarque : La fonction Activité ne modifie pas le glucose cible utilisé dans les calculs de bolus.

1



- Appuyez sur le bouton Menu dans l'écran d'accueil.

2

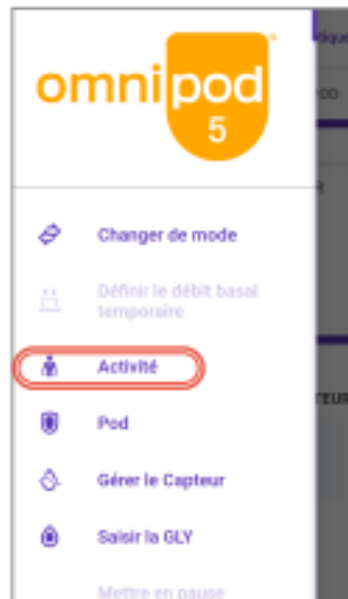

- Appuyez sur **Activité**.

3




- Définissez la durée (1 à 24 heures).
- Appuyez sur **CONFIRMER**.

4



- Appuyez sur **DÉMARRER**.

5

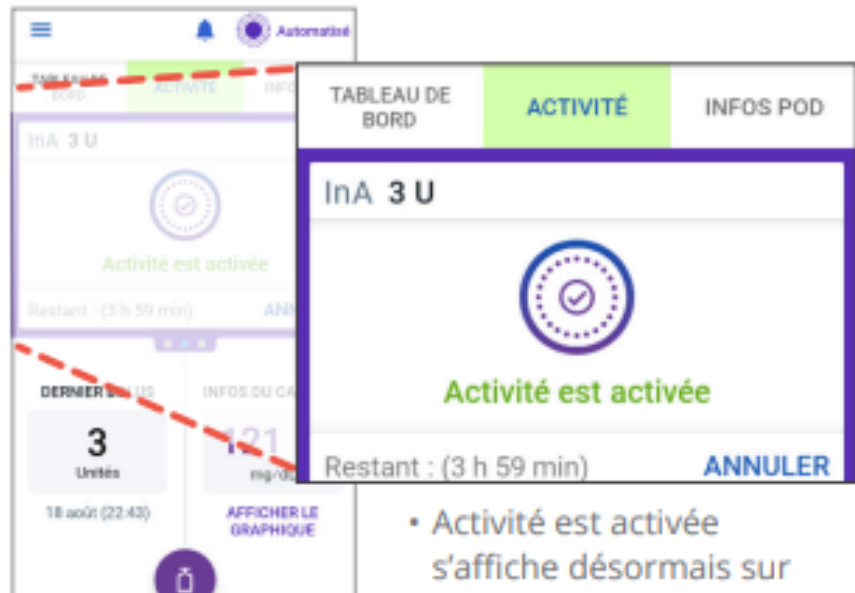

- Activité est activée s'affiche désormais sur l'écran d'accueil.

6- Le mode ACTIVITÉ

Annuler la fonction Activité



Automatisé


Vous pouvez annuler la fonction Activité à tout moment. Dès l'annulation ou l'expiration de la période définie, l'administration automatisée d'insuline basale redémarre d'elle-même et le système Omnipod 5 recommence à utiliser le glucose cible défini.

1



- Appuyez sur **ANNULER** dans l'onglet ACTIVITÉ.

2

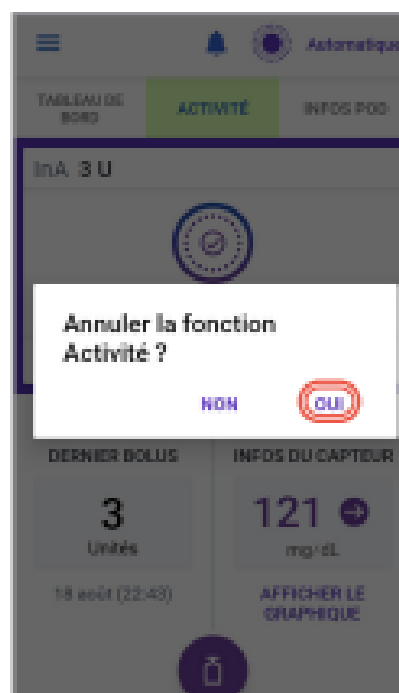

- Appuyez sur **OUI**.